

4 - Beschrijving

handilift™
WHEELCHAIR LIFT

4.2 Overzicht

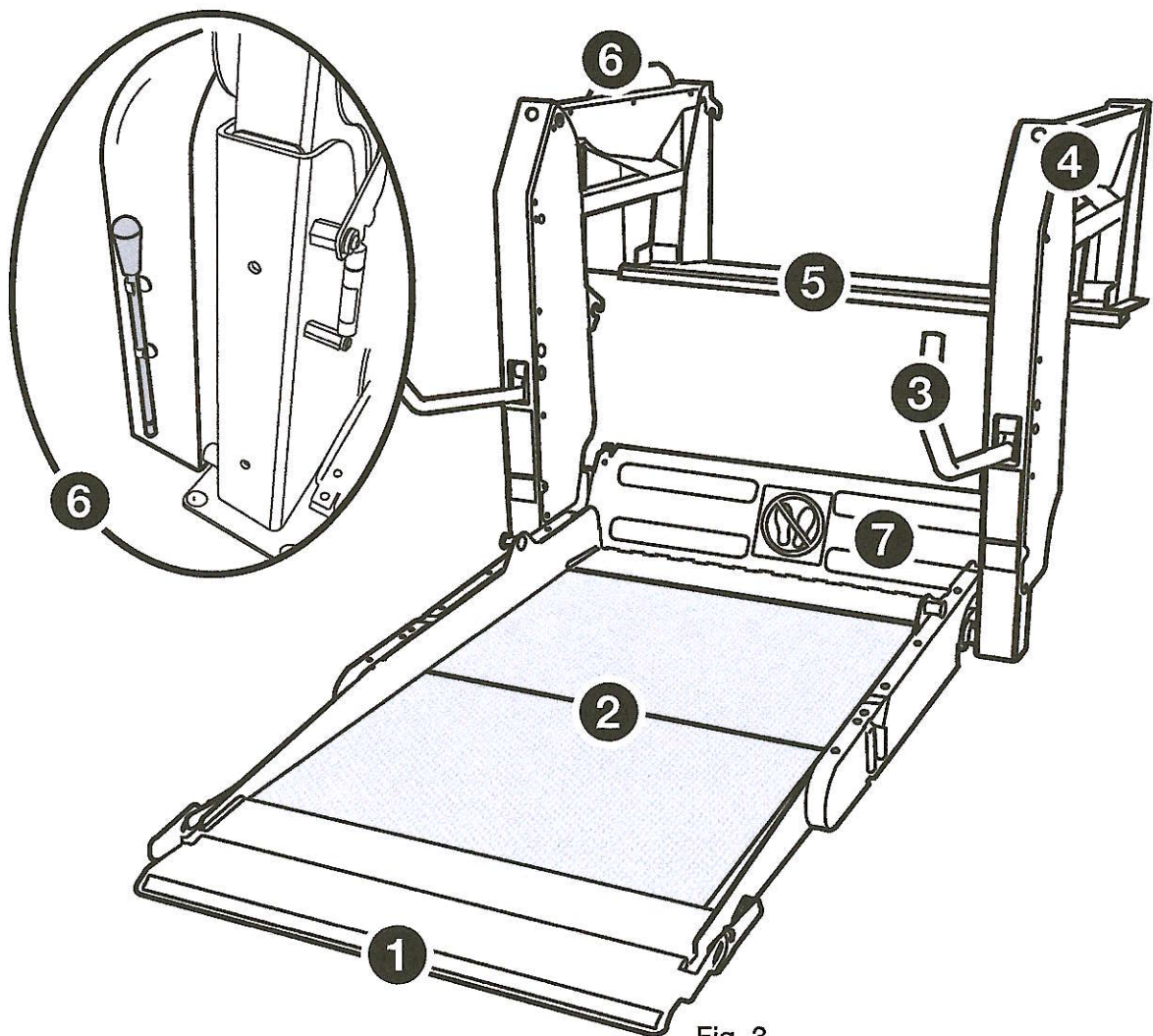


Fig. 3

- ① Afrolbeveiliging
- ② Platform
- ③ Handrails
- ④ Liftarmen
- ⑤ Liftbasis
- ⑥ Electro/Hydraulische unit, noodbediening
- ⑦ Brugplaat


5 - Aanduidingen

handilift™
WHEELCHAIR LIFT

5.1 Posities van de aanduidingen.

1 Voorzijde linker lift arm

Waarschuwingen 1) ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN DE LIFT KAN LETSEL VEROOZAKEN 2) DE GEBRUIKER MOET DE HANDLEIDING LEZEN EN OPVOLGEN VOOR GEBRUIK VAN DE LIFT 3) CONTROLEER DE LIFT OP ONDERHOUD VOOR GEBRUIK 4) HET VOERTUIG MOET OP DE HANDREM STAAN VOOR GEBRUIK 5) LET OP DAT DE LIFT NIET OVERBELADEN WORDT 6) ZORG ERVOOR DAT NIEMAND ZICH BEVIND BINNEN DE WERKZAME CIRKEL VAN DE LIFT 7) BLIJF TIJDENS GEBRUIK VAN DE LIFT UIT DE BUURT VAN BEWEGENDE DELEN VAN DE LIFT
GEBRUIKSAANWIJZING
OPENEN / ZAKKEN 1) OPEN DE ACHTERDEUREN 2) ZORG ERVOOR DE AFSTANDBEDIENING ACTIEF IS 3) DRUK BLIJVEND OP DE "DEPLOY-DOWN" KNOP (A) TOT DAT HET PLATFORM VAN DE LIFT ZICH GEHEEL HEEFT GEOPEND 4) DRUK BLIJVEND OP DE "DEPLOY-DOWN" KNOP (A) TOT DAT HET PLATFORM DE GROND RAAKT
HEFFEN / SLUITEN 1) DRUK BLIJVEND OP DE "STOW-UP" KNOP (B) TOT DAT HET PLATFORM GELIJK IS MET DE WAGENVLOER 2) LET ER VOOR HET SLUITEN OP DAT HET PLATFORM VRIJ IS 3) DRUK BLIJVEND OP DE "STOW-UP" KNOP (B) TOT DAT HET PLATFORM ZICH GESLOTEN HEEFT 4) DEACTIVEER DE AFSTANDBEDIENING VAN DE LIFT 5) SLUIT DE ACHTERDEUREN

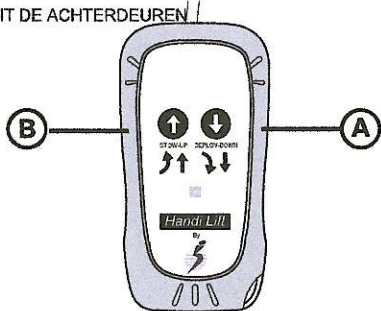

3

4



Op de brugplaat



HYDRAULIC LIFT	
SERIAL NO.	YEAR OF MANUFACTURE
CAPACITY	Kg MAX. PRESSURE BAR

CAR OIL SYSTEM s.r.l. - 46029 SUZZARA (MN) ITALIA
Via Pacinotti 14/B - (Z.A.I. Rangavino) - Tel. (0376) 638768
r.a. - Fax (0376) 536768



2 Voorzijde rechter lift arm

Noodbediening
OPENEN / ZAKKEN
HEFFEN / SLUITEN

5

QC-INSPECTED	
BY:	DATE:
handicare	handicare.dk

Aanduiding van
kwaliteitscontrole

Identificatie plaatje, gemonteerd aan
de binnenzijde van de linker liftarm

5 - Aanduidingen

handilift™
WHEELCHAIR LIFT

5.1 Aanduidingen op de elektro/hydro unit

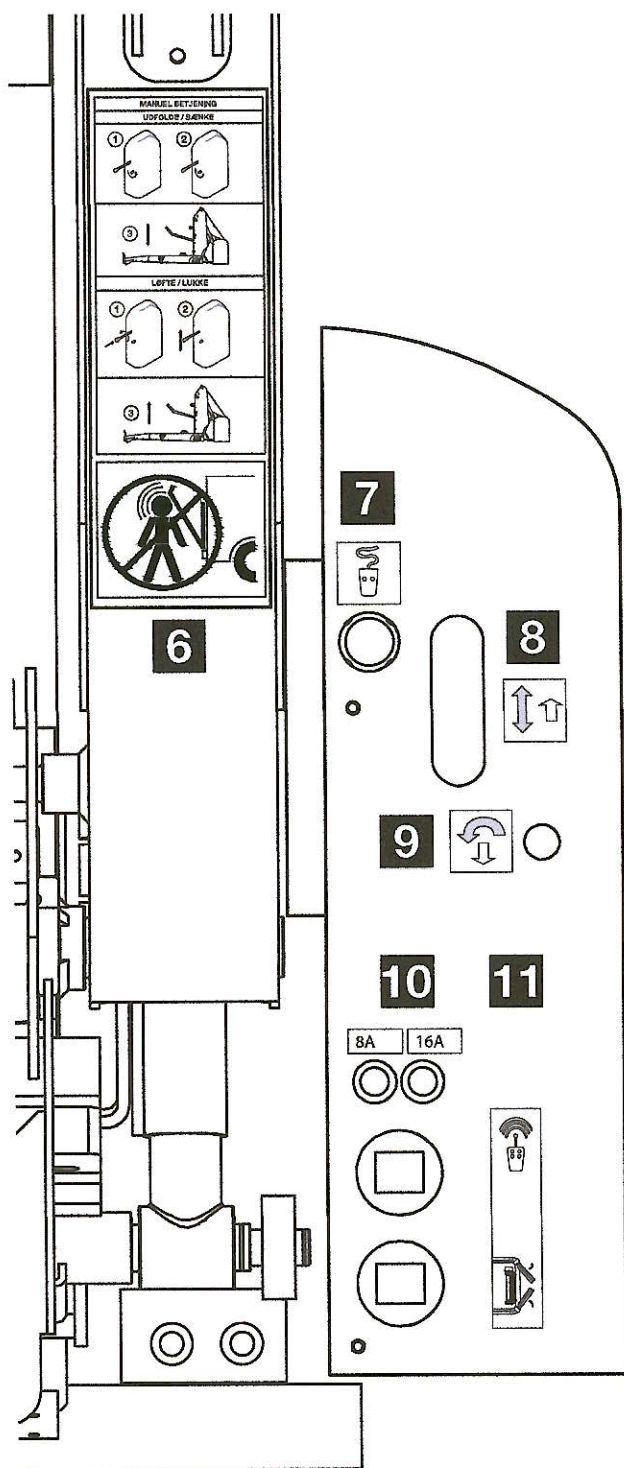



Fig. 7

6




Ga niet binnen
de reikwijdte van
de lift staan

7

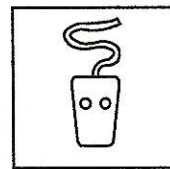


Aansluiting voor
de afstandsbediening

8

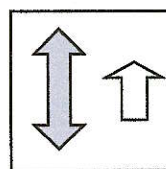

Opening voor pomp-
handel noodbediening

9

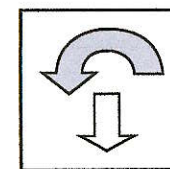

Bedienings knop
noodventiel


10

8A

16A

Automatische
zekeringen

11

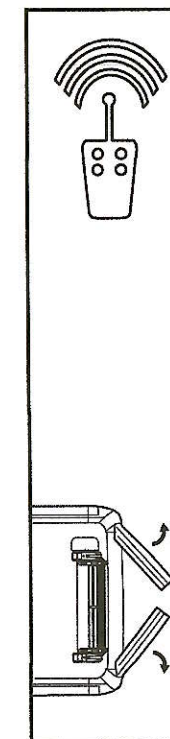

Verbindings pluggen
optionele onderdelen
en accessoires

6 - Bediening

handilift™
WHEELCHAIR LIFT

6.1 Handrail schakelaar (optioneel)

Wanneer er in de handrails een tuimelschakelaar gemonteerd is, heeft deze de zelfde functies als de bedrade afstand-bediening. Een opwaardse bediening zorgt voor het omhoog gaan van het platform, een neerwaardse bediening laat het platform zakken.

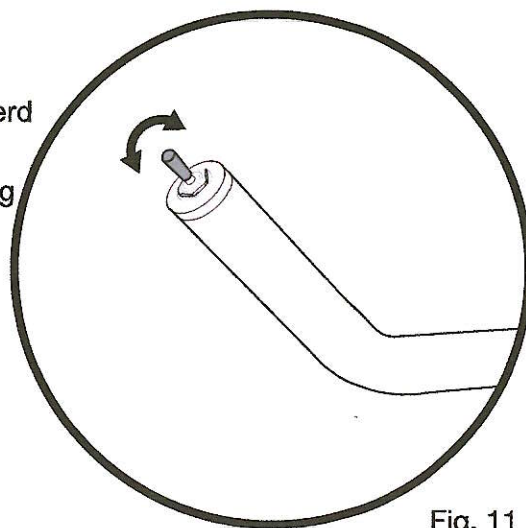


Fig. 11



Gevaar: Laat de lift nooit onbeheerd achter als hij door derden te gebruiken is.



Opgepast: Het is belangrijk dat de gebruiker overzicht heeft over de situatie.



Opgepast: Dubbele commando's van de bedieningsorganen zullen door de lift worden genegeerd.

5.4 Noodbediening

Aan de achterzijde van de electro/hydro unit is een noodbedieningshandel bevestigd. Deze kan worden gebruikt bij de noodbedieningsprocedure.

The procedure bestaat uit: een nood- **9** (zie pagina 14) ventiel om de lift te laten zakken.

Daarboven zit een handpomp die bedienbaar is met de noodbedieningshandel. Hiermee is het platform te heffen en op de bergen (stow).

Instructies zijn te vinden op pagina 26.

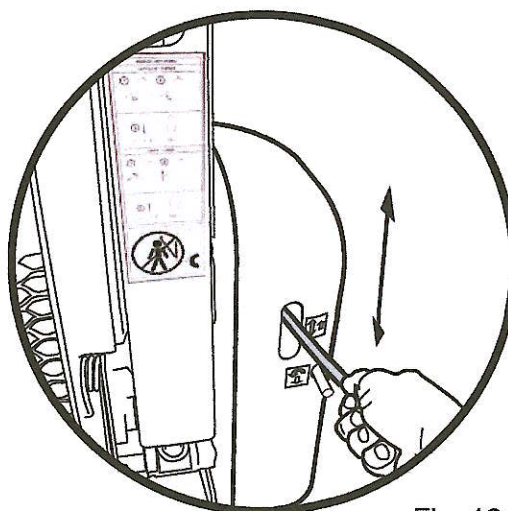


Fig. 12